

新製品

介護を取り巻く環境にもっと笑顔を

新商品ご紹介
2/1取扱い開始しました

Emi 笑

在宅介護向け電動ベッド Emi (エミ)

ご利用者様の快適
を追求したベッド

業界初の足上げ機
能付き★
(ショック体位)



Emi / 3つのコンセプト

快適

安全

簡単

Emi Webページ



簡単 Easy



商品のご相談・価格等につきましては直接営業にお声掛けください。ご連絡お待ちしております。

低床 / 超低床をカンタン切り替え

脚座の差し込み方向を縦・横と変えるだけでベッド床高を変更することができ、1台2役で在庫負担の軽減に繋がります。

高さ変更時、手元スイッチの表示切替も簡単にできます。

[低床タイプ] [超低床タイプ]



低床タイプ



縦向きに差し込み

超低床タイプ




横向きに差し込み

長さ切り替えにオプション不要

ベッドの長さはオプションや工具無しで変更できます。サイズ別に在庫を持つ必要がなく、在庫負担の軽減に。また、脚側のボトムを調節するだけで長さを変更できます。

※ロングサイズは専用のマットレスが必要となります。

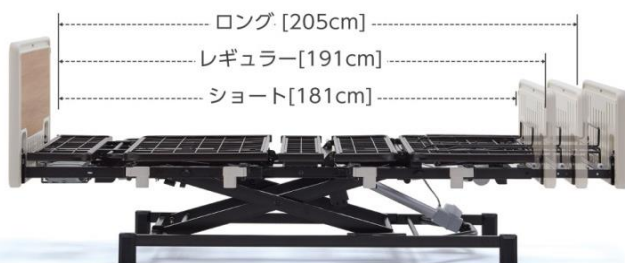

快適 Comfortable

頭頸部を前屈させることにより
嚥下や呼吸機能への好影響が期
待できるADLポジション

98%

※1

肺炎による死亡割合（65歳以上）

70%

※2

誤嚥性肺炎の割合

誤嚥ケア・円背
の方にもオスス
メ★

ADL ポジション | 誤嚥リスクの低減に

「頸部前屈位」という顎を引いた前向き目線の姿勢になり、
誤嚥リスクを低減します。
ベッド上での食事や投薬時に、また口腔ケア時のポジショニングに
ご使用ください。

ヘッドレスト未使用時




ヘッドレスト使用時



驚きのズレない背上げ

背上げ時に背ボトムの支点が8cm 後ろにスライドする「スイングバック機能」により、腹部の圧迫と前ずれを軽減します。

スイングバック未使用時

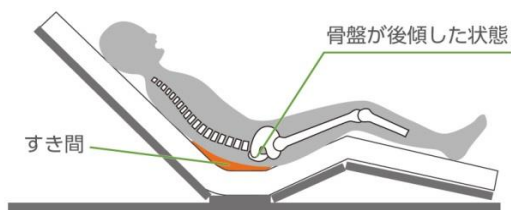

背上げ時に隙間が生まれ、骨盤が後傾した状態となり
いわゆる「ずっこけ姿勢」となっていました。

スイングバック使用時



骨盤が立った状態で、お腹の圧迫感が無くズレのない背上げに。
床ずれリスク軽減につながります。

業界最高※の脚上げ

在宅医療への活用

血圧が急に下がった場合のショック体位や、脚をギプスで固定している
場合に足先が腫れるのを防ぐために高い脚上げが有効です。

床ずれリスク軽減に

脚上げが高いので、背上げ時の前ズレ防止に繋がります。

● 現場でこんな事ありませんか？

むくみを解消するために脚上げをする際、在宅ベッドの脚上げ高が低い
ため、脚先にクッションなどを置いて脚の高さを上げている。

Emi ならクッションを使わなくても高い脚上げを実現！
脚先は下がらず、完全に水平になるためむくみ解消効果がより期待できます。

業界初！
ここまで
上がるのは
Emi だけ

2モーター+
ヘッドレスト

脚上げ 30°

3モーター+
ヘッドレスト

脚上げ 45°

足先が水平に



頭・背・足の角度や高さの数値が一目でわかる表示

どなたでも使いやすい手元スイッチ

ユニバーサルデザイン



液晶画面

頭・背・足の角度[※]や高さの数値が一目でわかります。
例えば在宅などで、医療従事者からのポジショニングの指示を忠実に再現することができます。

音声案内

動作時に音声案内が出るため、誤操作の防止につながります。

※お好みの音量に設定ができます。(音量レベル0～3)



[通常画面]



[動作画面]



操作履歴をケアの質向上に活用

操作ログ画面では、それぞれのボタンを押した回数と、動作の合計時間を確認できます。

● 操作履歴をケアに活用(例)

脚のむくみ解消のために「3 モーター」を選んだが、モニタリング時に操作履歴を確認すると脚上げが使われていないことがわかった。

脚上げの使用を促すことで、むくみ解消や背上げ時の前ズレ防止に。

[操作ログ画面]

操作ログ 1	
頭 (上、下)	162
00.21.18	
背 (上、下)	346
00.57.34	

- 1 ボタン押下回数
- 2 動作合計時間 [時間 . 分 . 秒]

ポジショニングボタン

※「2 モーター+ヘッドレスト」のみの機能です。

お好みボタン

ボタンを押すだけで事前に登録したポジションに自動調節できます。利用者に合わせたポジション設定などに活用ください。



水平ボタン

ボタンを押すだけで、完全にベッドがフラットの状態になります。就寝時やおむつ交換時に活用ください。



誤操作を防止するロック機能

操作を禁止したい動作の上がる・下がるボタンを同時に3秒押すと、個別動作のロックができます。

● 現場でこんな事ありませんか？

利用者から「ベッドが動かなかった」と電話があり、駆けつけたところロック機能がかかっていた。

ロック中のボタンを押下すると「ロックされています」と音声と画面で案内が出るため、わかりやすく安心。



[3 モーター+ヘッドレスト]



[2 モーター+ヘッドレスト]

