



LOHATES

暮らしを安全に、快適にする、
「支えたい想い」を形にした手すり。

空間に溶け込むさりげない佇まい。
【LOHATES】は、暮らしをアクティブに楽しむシニアを支える新しい形の手すりです。



紹介動画

こちらから製品の紹介動画をご覧ください
いただけます。



デザインの方で生活の質を向上。

床や椅子からの立ち上がりをサポートしてくれる【LOHATES】。その美しいデザインは、インテリアの中で、さりげない存在感をだします。機能と嗜好を両立させた形は、暮らしに寄り添いながら魅力あるインテリアの一部として機能し、豊かな日常生活を彩ってくれるでしょう。

はじめてみませんか、
手すりのある暮らし。



商品名
【LOHATES
(ロハテス)】は、カタカナの「ロ」と「ハ」を重ねたような形状と、「手すり」という機能を組み合わせて表現したものです。また、健康意識の高いライフスタイルを指す用語【LOHAS(ロハス)】をイメージさせる響きとなっています。

ホワイト



ブラック




LOHATES (ロハテス)

カラー	型式	商品コード	TAISコード
ホワイト	LH-03WT-R	759371	01265-000269
ブラック	LH-03BK-R	759372	01265-000270

●サイズ：幅43.5×奥行37×高さ63cm ●重量：約1.8kg
●材質：手すり/天然木、フレーム/スチール、ゴム足/PP+TPE

椅子からの立ち上がり方

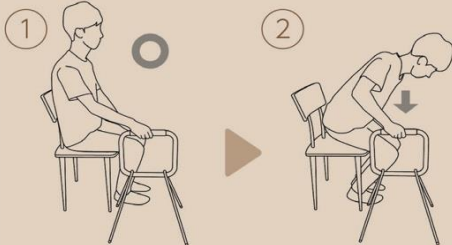

手すりの位置がひざ頭の少し前になるようにLOHATESを置く。

足を後方に引き、前傾姿勢となった状態でLOHATESを下に押しながら立ち上がる。

×NG



胴体の真横に置くと立ち上がりにくいので注意してください。

床からの立ち上がり方



正面にLOHATESを置き、1段目をつかみながら立ち上がりの姿勢を整える。

2段目をつかみ、前傾姿勢の状態でもLOHATESを下に押しながら立ち上がる。

お問い合わせはこちら